



Adper™Prompt™L-Pop™

Samoleptací adhezívum

Návod k použití

Popis výrobku

Adper Prompt L-Pop, vyrobený 3M ESPE je samoleptací adhezívum v blistrech L-Pop na jedno použití. Obě součásti v blistru jsou aktivovány po vytvoření roztoku k okamžitému použití. Leptání, priming a bonding jsou spojeny v jednom kroku, pouhým jedním nanesením. Adhezívum je možno polymerizovat halogenovou, LED nebo plasmovou lampou a laserem. Výrobek by měl být používán podle návodu k použití.

Možnosti použití

- vazba mezi dentinem/sklovinou a kompozitními výplňovými materiály
 - vazba mezi dentinem/sklovinou a kompomerními výplňovými materiály
- Adper Prompt L-Pop je vhodný pro světlem tuhnoucí kompozita nebo kompomery, nikoliv pro duálně nebo samotuhnoucí materiály.

Ochrana zdraví

- vyvarujte se kontaktu se sliznicí, pokožkou a očima. V případě náhodného kontaktu zasažené místo důkladně vypláchněte vodou.
- během zpracování používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
- vhodné je použití kofferdamu. Povrchové změny na dásni, které mohou v některých případech nastat jsou vratné.
- jako podložka by měly být použity materiály bez eugenolu. Materiály obsahující eugenol mohou nepříznivě ovlivnit polymerizaci adhezíva.

Příprava

- Vodním sprayem odstraňte odpreparované zbytky, ošetřované zuby osušte. Nepřesušte!
- Očistěte neošetřované zuby gumovým kalíškem a čistící pastou bez fluoridů, důkladně opláchněte vodním sprayem a osušte

Ochrana zubní dřevě

Pro předcházení podráždění zubní dřevě by měla být místa blízka dřevu překryta jemným nanesením přípravku na bázi hydroxidu vápenatého (např. Alkaliner, vyrobeno 3M ESPE). Přípravek s hydroxidem vápenatým může být překryt podložkovým materiálem (např. Vitrebond, vyrobeno 3M ESPE).

Smíchání Adper Prompt L-Pop

Upozornění: Neaktivujte Adper Prompt L-Pop bez připraveného aplikátoru!

=držte držadlo aplikátoru v jedné ruce

=mezi palcem a ukazováčkem druhé ruky stiskněte červený rezervoár tekutiny, směrem od vnějšího konce k připravenému aplikátoru

-když je červený rezervoár úplně vytlačen, dojde k jasnému vyklenutí žluté části blistru. Toto jasně viditelné vyklenutí indikuje správnou aktivaci blistru

=stlačte červený rezervoár, dokud není úplně prázdný a poté ho opatrně přehněte k žlutému rezervoáru

-aby jste předešli zpětnému přesunu tekutiny, držte červený rezervoár stisknutý, dokud ho nepřehnete

-červená a žlutá část blistru jsou teď přehnuty k sobě (pouze zelená část je nyní viditelná)

=směrem od vnějšího konce opět vytlačte všechnu tekutinu ze žluté části do zelené části blistru. Mírným tlakem přitiskněte kryt blistru k držadlu aplikátoru. Předejdete tím vystříknutí obsahu ven a kontaktu s pokožkou nebo oblečením.

=jakmile tekutina nateče do zelené části **pohněte připraveným aplikátorem v tekutině dozadu a dopředu**. Promísíte tak znova tekutinu a úplně pokryjete aplikátor.

=pro snadnější aplikaci do kavity můžete aplikátor ještě v blistru ohnout. Aplikátor vysuňte z blistru, dokud se neobjeví místo určené k ohybu (vroubkovaná část držadla) a ohněte aplikátor v tomto místě přes nehet vašeho palce

=aplikátor vyjměte pouze v případě, že ho chcete použít. **Když je tekutina správně promíchána má homogenní žlutavou barvu, bez barevných proužků**. Naneste adhezivum na každý zub **samostatně a rychle** podle popisu v části Aplikace

=během nanášení opatrně vytlačujte tekutinu z otevřeného konce zelené části blistru.

Umožníte tak smočení aplikátoru bez znečištění držadla tekutinou. Vždy když se držadlo aplikátoru znečistí tekutinou, ujistěte se, že znečištěná část nepřišla do kontaktu se sliznicí.

Aplikace

=naneste adhezivum na celý povrch kavity a do povrchu přibližně 5x5mm (25mm²)

adhezivum tlakem vmasírujte po dobu 15 sekund, větší povrch vyžaduje delší dobu vmasírování.

-kratší čas není dostatečný pro nanesení a rozetření a není přípustný

-adhezivum musí být vmasírováno do celého povrchu. V tomto kroku je povrch kavity leptán, kondicionován a překryt adhezivem. Čím důkladněji je adhezivum vmasírováno, tím lépe

-v průběhu manipulace chraňte používaný aplikátor před světlem

-pokud je aplikátor znečištěn slinou nebo krví použijte nový Adper Prompt L-Pop nebo nový aplikátor. Aplikátory jsou k dispozici samostatně ve velikostech M (střední) a XS (jemný).

=dále rozfoukněte adhezivum do tenkého filmu. Povrch musí být lesklý. Pokud není, adhezivum znova neneste a rozfoukněte. Povrch bez hedvábného lesku zhoršuje vazbu!

=vytvrďte adhezivum 10 sekund LED nebo halogenovou lampou. V případě použití laseru nebo plasmové lampy vytvrzujte 3 sekundy.

=dále pokračujte podle návodu k použití vašeho výplňového materiálu

Poznámky

Pro vazbu je velmi důležité, aby obě vazebné složky byly důkladně smíchány. Použití neúplně aktivovaného blistru může vést k selhání vazby.

Vmasírování adhezíva pouze částečně, nebo kratší dobu zhoršuje vazbu.

Likvidace

Likvidujte pouze zcela prázdné balení. Zbytky leptací tekutiny mohou být vylity do odpadu pouze po silném naředění vodou a neutralizaci.

Nežádoucí reakce

U vnímavých jedinců nemůže být přecitlivělost na produkt vyloučena. V případě alergické reakce přerušete aplikaci přípravku a přípravek úplně odstraňte. Ve výjimečných případech, zejména při nedodržení doporučeného postupu, je možné podráždění pulpy.

Skladování a trvanlivost

Adper Prompt L-Pop blistry by měly být chráněny před světlem. Nevystavujte produkt teplotám přes 25°C. Produkt nepoužívejte po datu expirace.

Informace pro zákazníky

Žádná osoba není oprávněna poskytovat informace, které se neslučují s tímto informačním letákem.

Záruka

3M ESPE zaručuje, že teno výrobek bude bez závad materiálu a zpracování.

3M ESPE nenesé žádnou jinou odpovědnost včetně jakékoli jiné aplikované záruky, vystavené za zvláštním účelem..

Žádná osoba není oprávněna poskytovat informace, které se neslučují s tímto informačním letákem. Uživatel je odpovědný za určení vhodnosti použití tohoto výrobku. Pokud je tento výrobek vadný v záruční době, bude 3M ESPE opraven nebo nahrazen 3M ESPE výrobkem.

Omezení záruky

3M ESPE není zodpovědná za žádné ztráty nebo škody vyplývající z používání tohoto výrobku, včetně přímých, nepřímých, zvláštních, náhodných nebo následných, bez ohledu na prohlášení včetně záruky, smlouvy, zanedbání nebo místních s výjimkou místních záruk, s výjimkou míst, kde je to zakázáno zákonem.

Poslední obnovení 11/02