

## Puli-Jet plus

### Desinfekce

Puli-Jet plus je nepěňivý koncentrát bez obsahu aldehydů určený k desinfekci a simultánní deodorizaci, čištění a údržbu všech typů dentálních aspirátorů (mokrých, polosuchých a suchých systémů). Doporučuje se desinfikovat aspirátor každý večer po práci a lokální omytí (cleansing washing) alespoň jednou denně uprostřed dne. Kromě toho se doporučuje provést desinfekci systému po ošetření po ošetření pacientů s vysokým rizikem infekce. Obecně platí pravidlo podle konkrétní situace profesionálně zvážit nutnost provedení omytí a desinfekce, aby se riziko kontaminace minimalizovalo. Po použití důkladně otřete z láhve všechny kapky, aby se předešlo nebezpečí koroze nebo znečištění.

### Návod

- 1/ **Plnění dávkovače:** láhev držte pokud možno na rovném povrchu hrdlem vzhůru. Odšroubujte uzávěr a naplňte po okraj dávkovač jemným stlačením láhve v místech s nálepkami (pozor na přeplnění). Uvolnění stlačením láhve a přebytečná kapalina se vrátí zpět do láhve. V dávkovači zůstane přesně 10ml koncentrátu.
- 2/ **Běžné čištění:** po naplnění dávkovače nalijte koncentrát do Pulse Cleaneru, který před tím musí být naplněn 2,5l horké vody (40-50°C) až po držák násosek. Pak roztok nasajte přes koncovky.
- 3/ **Desinfikování:** do Pulse Cleaneru s 2,5l horké vody (40-50°C) nalijte dva plné dávkovače koncentrátu a následně nasajte přes koncovky.

**Obsah:** 15%: 1-methoxy-2-propanol, <10%: 4-chloro-3-methylphenol, 2-hydroxybiphenyl, <5%: edta, sodium, hydroxid sodný, phenol, 2-benzyl-4-chlorophenol.

**Aktivní spektrum:** při koncentraci 0,8% (dva dávkovače v 2,5l vody) byl Puli-Jet plus testován a vyhodnocen jako efektivní baktericid (prEN13727) a fungicid (prEN13624). Dále byl sledán jako efektivní virucide (CEN/TC 216 N270) a tuberculocidální (prEN 14348).

R34	Způsobuje popáleniny
R41	Riziko vážného poškození očí
R43	Může být senzitivizující při styku s kůží
R21/22	Škodlivý při styku s kůží a při požití
R52/53	Škodlivý účinek na vodní živočichy, může způsobit dlouhodobé poškození vodního prostředí
S45	V případě nehody nebo pokud se budete cítit špatně vyhledejte ihned lékaře a pokud možno ukažte nálepku přípravku
S60	Tento materiál včetně obalu musí být likvidován jako nebezpečný odpad
S61	Zabraňte úniku do okolního prostředí. Prostudujte zvláštní/bezpečnostní instrukce
S36/37/39	Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné pomůcky očí