

Vertex ProClean

čisticí sprej na zubní náhrady 100 ml

Charakteristika a použití:

Vertex ProClean čisticí sprej je navržen jako čisticí prostředek na akrylové polymerové snímací náhrady, ortodontické aparáty a ústní chrániče. Udržuje je v optimálních hygienických podmínkách. ProClean je složen z bezpečných přírodních látek pro čištění, které jsou biologicky účinné. ProClean pečuje o aparáty a chrániče a uživatel má při jejich nošení pocit příjemné chuti a svěží dech.

Rizika a bezpečnostní předpisy:

Nepoužívejte ProClean na protézu či aparát přímo v ústech, vždy před nasazením do úst opláchněte protézu či aparát čistou vodou.

Návod k použití

Čištění:

Před použitím třepejte s lahvičkou několik vteřin. Vyjměte zubní protézu nebo aparát z úst, opláchněte jej pod tekoucí vodou a poté stříkněte 4krát rovnoměrně na protézu či aparát. Použijte měkký kartáček pro vyčištění a zároveň se ujistěte, zda ProClean vyčistil všechny části protézy. Po použití opláchněte pod tekoucí vlažnou vodou. Nikdy nepoužívejte ProClean přímo v ústech!

Hygienické uložení náhrad a aparátů:

ProClean může být také použit k uložení náhrad a aparátů (např. přes noc). Vložte vyčištěný aparát do krabičky a poté aplikujte asi 10 stříknutí - rovnoměrně na aparát a stěny krabičky. Dolijte do krabičky vlažnou vodu. Před dalším použitím opláchněte aparát pod tekoucí vodou.

Složení:

Aloe Vera, kokosový olej, čajovníkový olej, levandule, myrha, japonská máta, heřmánek, šalvěj, konzervant E211, benzoát sodný.

